

# 取扱説明書 ケブザラ®皮下注 150mgシリンジ

シリンジをご使用になる前に本説明書を必ずお読みください。

ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体

## ケブザラ®皮下注150mgシリンジ

KEVZARA® サリルマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品 劇薬 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

お問い合わせ

●ケブザラ専用ダイヤル

☎ 0120-764-221


(9:00~17:45/土日祝・休業日を除く)  
自己投与に関するお問い合わせ/24時間受付

🗣️ お問い合わせの内容は正確に対応するために、  
録音させていただいております。ご了承ください。

150  
mg

### シリンジのご使用にあたって

シリンジには、薬液があらかじめ充てんされています。  
このシリンジは1回のみ使用できる使い捨てタイプです。

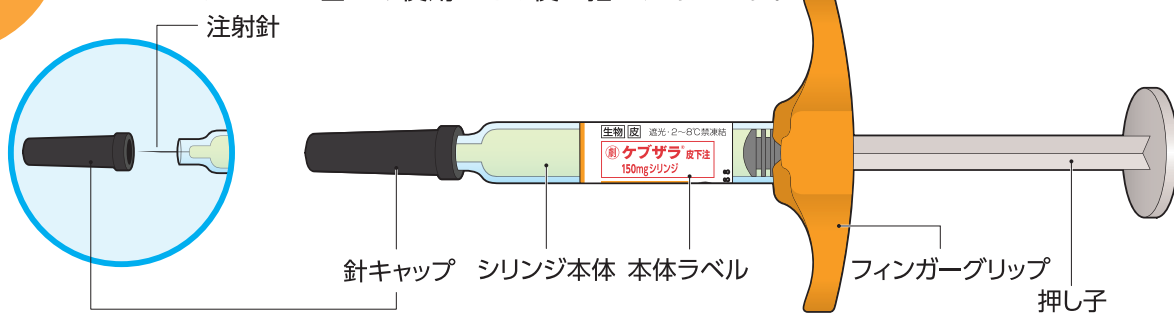



- 使用前に冷蔵庫から取り出し、個装箱に入れたまま30分以上置いて室温に戻してください。

- <保管方法>
- 未使用のシリンジは元の個装箱に入れたまま、冷蔵庫(2℃~8℃)で保管してください。
  - お子さまの視界に入らない、手の届かないところに保管してください。
  - 直射日光にさらさないでください。

## 使用手順

### 1 シリンジを室温に戻す

- シリンジを冷蔵庫から取り出し、個装箱に入れたまま、表面が平らな場所に30分以上置いて室温に戻してください。
- 個装箱からシリンジを取り出す際は、必ず本体の中央部を持って取り出してください。
- 本体ラベルを見て使用する製剤と投与量が正しいこと、使用期限内であることを確認してください。
- 薬液が濁っておらず、無色から微黄色であることを確認してください。

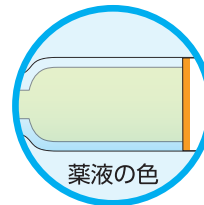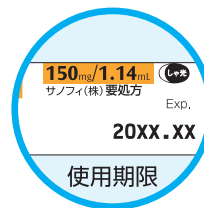


⚠️ 注意

- 室温に戻るまで個装箱から取り出さないでください。
- 本体が破損している場合や、針キャップがついていなかったり外れたりしている場合は本品を使用しないでください。
- 使用期限が切れているものは使用しないでください。
- 気泡が見られることがありますが、異常ではありません。
- 薬液が濁っている、変色している、浮遊物が見られる場合は使用しないでください。

### 2 注射する場所を選び、準備をする

- 大腿部(太もも)前面または腹部(へその周り5cmは避ける)、上腕部(二の腕)に注射できます。

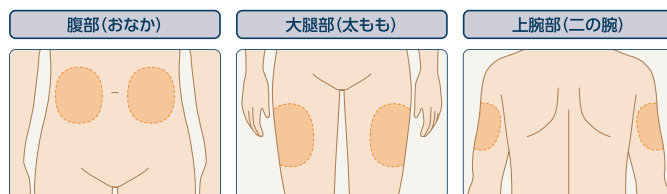

※へその周り5cm程度は避けて注射してください。

⚠️ 注意

- 手をよく洗ってから、アルコール綿で注射部位の皮膚を消毒します。消毒後は注射部位に触れないでください。
- 同じ場所に繰り返し注射することは避け、前回の注射部位から少なくとも3cm離してください。
- 皮膚が敏感なところ、傷や発疹があるところ、赤くなったり、硬くなっているところには注射しないでください。


SANOFI REGENERON

つづきは裏面をご参照ください。➡️

## 3 シリンジの針キャップを外す


- 注射針を自分の方に向けないようにして、シリンジ本体の中央部を持ち、針キャップを引っ張って外します。
- このとき、押し子には触れないようにしてください。

- 注意**
- 注射の準備ができるまで針キャップは外さないでください。
  - 一度外した針キャップは元に戻さないでください。

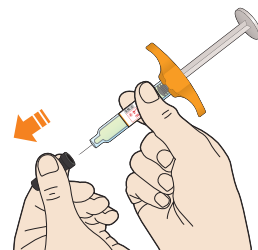


## 4 皮膚をつまむ

- 注射する部位の皮膚を指でつまみます。

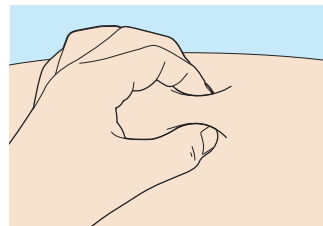


## 5 つまんだ皮膚に注射針を刺す

- 注射針をおおよそ45度に傾けて、つまんだ皮膚に刺します。

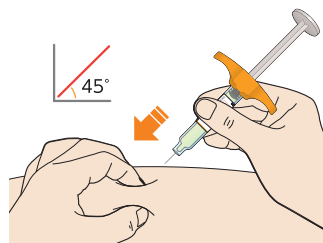

## 6 押し子を押す


- 押し子をゆっくりと確実に押し込み、すべての薬液を注入します。

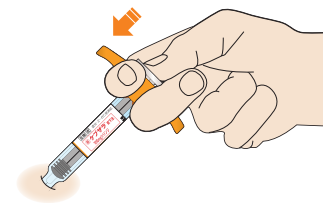

## 7 注射針を皮膚から抜く

- 薬液を注入しきったことを確認したら、注射針を皮膚(注射部位)から抜きます。
- アルコール綿で10秒程度、注射部位を軽く押さええます。


- 注意**
- 注射針を刺した時と同じ角度で注射針を皮膚から抜いてください。
  - 注射部位から血が出ている場合は、アルコール綿でしっかり押さええて止血します。
  - 注射後、注射部位をもまないでください(腫れることがあります)。

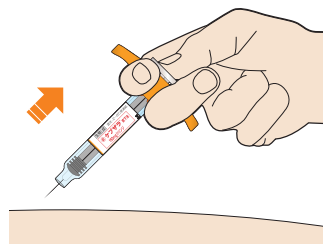

## 8 シリンジを廃棄する

- 使用済みのシリンジと針キャップは使用後直ちに廃棄ボックスに入れ、医療廃棄物として適切に廃棄してください。
- 廃棄の方法については、医療機関の指示に従ってください。

- 注意**
- 一度外した針キャップは元に戻さないでください。
  - 使用後のシリンジは、分解しないでください。
  - 廃棄ボックスはお子さまの視界に入らない、手の届かないところに置いてください。
  - 使用済みのアルコール綿はお住まいの地域の収集方法に従って処理してください。

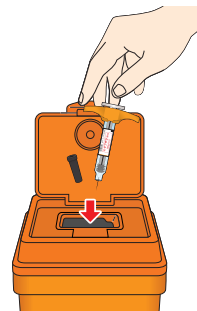

製造販売元: **サノフィ株式会社**

〒163-1488  
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

発売元: **旭化成ファーマ株式会社**

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号